



Mascarilla desechable Modelo N95

El respirador desechable N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Cuenta con un medio electrostático avanzado que permite una mayor facilidad para respirar.

Incluye cintas elásticas confeccionadas con látex de hule natural, clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello. Elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster.

Almacenar en lugar limpio y seco a temperatura entre -5°C y 38°C con un humedad relativa $>70\%$.

Características Técnicas

Material	Polipropileno, Tela no tejida
Peso aprox	10 gr
Nombre producto	N95 9010
Color	Blanco
Empaque	1 pieza por bolsa Caja de 50 piezas
Esterilizado	No estéril
Procedencia	China
Certificación	NIOSH- Norma 42CFR84
Marca	3M



Concentraciones Limites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el limite de exposición o menor de 0,05 mg/m³
- No usar en atmosferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5%
- No usar en atmosferas en las que el contaminante estén concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud)
- No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

Instrucciones de uso



1. Con el clip nasal hacia el frente, y el respirador separado de su cara, sujete cada extremo de la banda inferior en cada mano cuidando que el respirador (incluyendo el clip nasal) quede hacia el frente y hacia arriba

2. Coloque el respirador debajo de la barbilla, jale la banda inferior pasándola sobre su cabeza y colocándola sobre su cuello, por detrás de la oreja



3. Jale la banda superior sobre su cabeza y colóquela en la coronilla



4. Usando ambas manos forme el clip de la nariz a la forma de la parte inferior de la nariz para asegurar la perfecta adherencia y buena sujeción. Si pellizca el clip nasal con una mano, el rendimiento de la máscara es menos efectivo



5. Antes de usar la máscara, verifique el ajuste perfecto en la cara. Cubrir la parte frontal del respirador con las dos manos cuidando no modificar la posición del respirador. Exhale con fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip nasal como se describe en el punto 4. Si se notan fugas de aire en los extremos del respirador, reajustar las bandas de sujeción.